
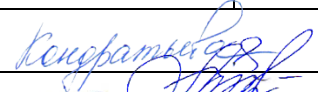
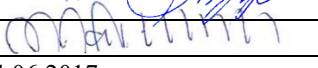
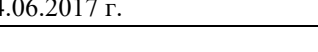

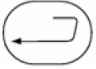

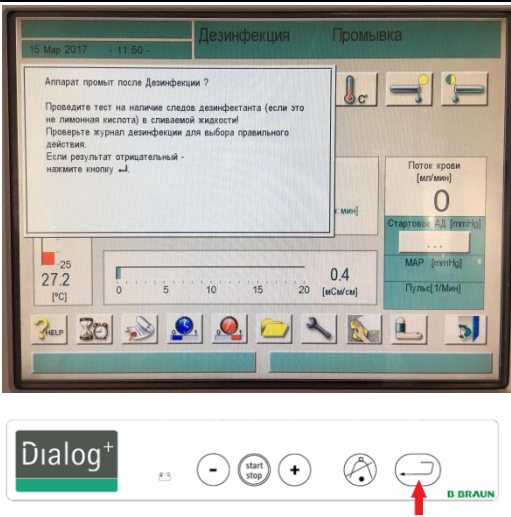

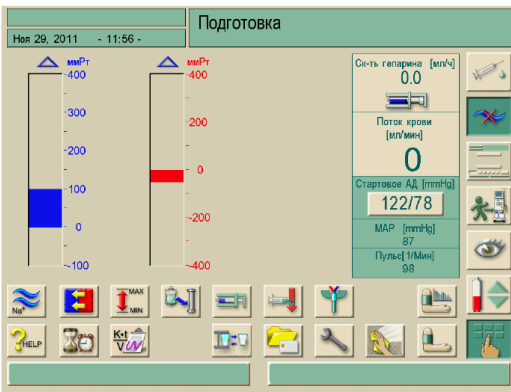
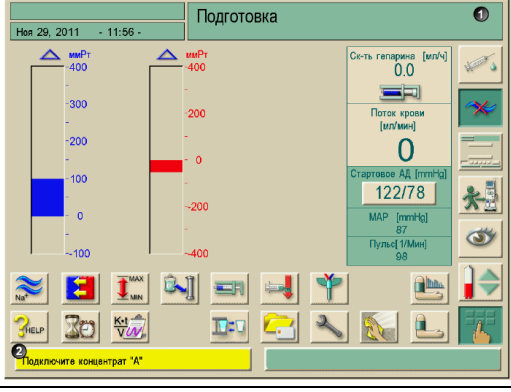






Тип документа	АЛГОРИТМ					Страница 1 из 8
Назначение	Весь старший и средний медицинский персонал центров ТОО «В.В.NURA» в Республике Казахстан					
Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Ж2/1	Редакция	001	
Название	ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК САМОТЕСТИРОВАНИЯ АППАРАТА В BRAUN DIALOG+ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГДГДФГФ					
Разработано	Директор по операционно-клинической деятельности		Кондратьева О.О.			
Согласовано	Медицинский директор		Аубакиров М.Е.			
Подписано	Генеральный директор		Эргезер М.Ф.			
Утверждено	Приказом Генерального директора ТОО «В.В.NURA» № 32 от 14.06.2017 г.					
К внедрению с	19.06.2017 г.					



Цель:



- Обеспечить безопасную и эффективную подготовку диализного аппарата к проведению процедуры.

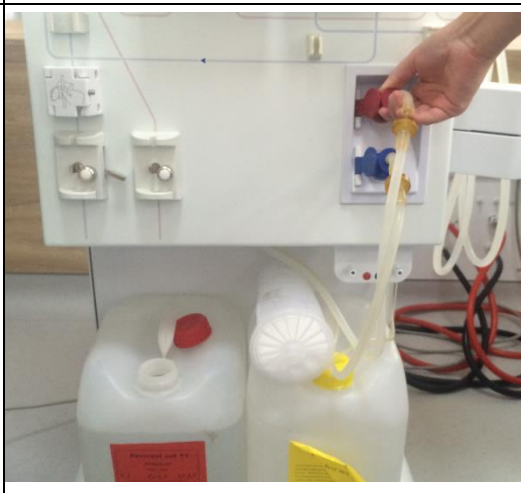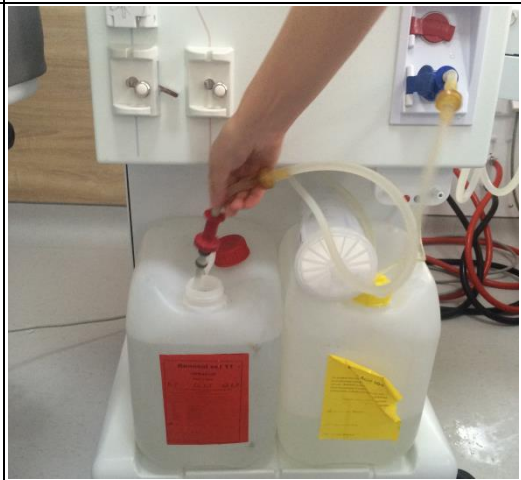





№	Положения	Пояснения, иллюстрации
1.	Обработать руки кожным антисептиком на спиртовой основе, используя 6-ступенчатую методику и соблюдая время экспозиции.	
2.	А) Если аппарат выключен: <ul style="list-style-type: none"> Включить аппарат нажатием кнопки «вкл/выкл» на боковой панели монитора диализного аппарата. 	
3.	После включения аппарата экран примет следующий вид => Дотронуться до поля 1.	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Для ГД-аппарата</p>  </div> <div> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Для ГДФ-аппарата</p>  </div> </div>


Тип	АЛГОРИТМ	Код	БН-VIII/01	Номер	МЕД-Ж2/1	Редакция	001	Страница	2 из 8	
Название	ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК САМОТЕСТИРОВАНИЯ АППАРАТА В BRAUN DIALOG+ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГД/ГДФ/ГФ									
4.	<p>Б) Если аппарат закончил процедуру дезинфекции после предыдущего диализа:</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку  Дотроньтесь до иконки  <p>Диализный аппарат перейдет в главное меню.</p>									
5.	<p>В зависимости от конфигурации, после промывки, диализный аппарат может переключиться в режим подготовки к диализу или остаться в режиме промывки. Тем не менее, окно с предупреждением о проверке отсутствия дезинфектанта в аппарате остается на экране до того момента, пока его не подтвердят кнопкой </p>									
6.	<p>Появится первое окно подготовки процедуры ЗПТ.</p> <p>Аппарат начнет автоматическое самотестирование (проверка всех функций, важных для обеспечения безопасности процедур).</p>									
7.	<p>Во время автоматического тестирования, в поле 2 появляются сообщения на желтом фоне, если аппарат ждет от Вас каких-либо действий (например, присоединения коннекторов к концентрату).</p> <p>Тестирование продолжится только после того, как требуемое действие будет выполнено.</p>									
8.	<p>После окончания теста гидравлической части, появится сообщение на желтом фоне, о том, что необходимо подключить кислотный концентрат (А).</p>							 Кислотный концентрат всегда маркирован красным цветом (красная крышка или этикетка канистры, порт аппарата, заборник).		

9.	<p>Присоединение кислотного концентрата:</p> <p>А) если кислотный концентрат поставляется в канистрах:</p> <ul style="list-style-type: none"> Открутить крышку канистры с кислотным концентратом, 	
10.	<ul style="list-style-type: none"> Извлечь красный заборник из аппарата, 	
11.	<ul style="list-style-type: none"> Поместить красный заборник в канистру с кислотным концентратом. 	

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Ж2/1	Редакция	001	Страница	4 из 8	
Название	ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК САМОТЕСТИРОВАНИЯ АППАРАТА В BRAUN DIALOG+ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГД/ГДФ/ГФ									
12.	<p>Б) если осуществляется централизованная раздача кислотного концентрата:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извлечь красный заборник из аппарата. 									
13.	<ul style="list-style-type: none"> • Поместить его в порт централизованной подачи кислотного концентрата 									
14.	<p>Присоединение бикарбонатного концентрата:</p> <p>А) если бикарбонат поставляется в картриджах в виде сухого порошка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Снять защитные колпачки с картриджа (если есть), • Картридж потрясти (убедиться, что сода не высыпается из нижнего сегмента) 									

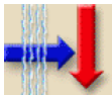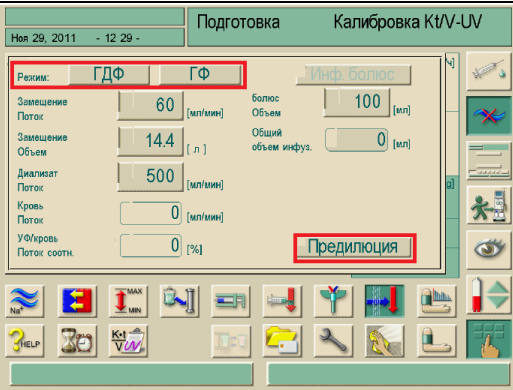Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Ж2/1	Редакция	001	Страница	5 из 8		
Название	ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК САМОТЕСТИРОВАНИЯ АППАРАТА V BRAUN DIALOG+ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГД/ГДФ/ГФ										
15.	<ul style="list-style-type: none"> Открыть держатель картриджа в аппарате, 										
16.	<ul style="list-style-type: none"> Поместить картридж в держатель, опустить верхний фиксирующий сегмент. Убедиться, что картридж плотно закреплен. 										
17.	<p>Б) если бикарбонат поставляется в канистрах в виде раствора:</p>							 Жидкий бикарбонатный концентрат всегда маркирован синим цветом (синяя крышка или этикетка канистры, порт аппарата, заборник). Картриджи с сухим бикарбонатным порошком не имеют цветовой маркировки.			
18.	<ul style="list-style-type: none"> Открыть синюю канистру 										
19.	<ul style="list-style-type: none"> Извлечь синий заборник из аппарата 										

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Ж2/1	Редакция	001	Страница	6 из 8	
Название	ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК САМОТЕСТИРОВАНИЯ АППАРАТА В BRAUN DIALOG+ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГД/ГДФ/ГФ									
20.	<ul style="list-style-type: none"> Поместить в канистру 									
21.	 Категорически запрещается смешивать содержимое красной и синей канистр!					Данная манипуляция приведет к серьезной поломке диализного аппарата по вине персонала, и невозможности проводить процедуры ЗПТ.				
22.	<p>Для проведения процедуры ГДФ/ ГФ (опция доступна только для соответствующих аппаратов):</p> <ul style="list-style-type: none"> нажмите иконку  <p>Появится экран с параметрами замещения</p>									
23.	<ul style="list-style-type: none"> Для гемодиализации коснитесь поля ГДФ (HDF), Для гемофильтрации коснитесь поля ГФ (HF), Если назначена процедура в режиме «Преддилюция», активируйте соответствующее поле нажатием. Если иное не назначено лечащим врачом, все процедуры замещения проводятся в режиме «ПОСТДИЛЮЦИЯ». <p>Теперь система замещения онлайн активирована.</p>					<p>Этим способом ГДФ/ГФ процедура может быть активирована даже в течение начала гемодиализа. Однако, в этом случае, магистраль замещения не будет протестирована.</p>				
24.	<p>В процессе внутреннего самотестирования аппарата можно устанавливать кровопроводящий контур, вводить параметры предстоящей процедуры.</p>									
25.	<p>После успешного окончания процесса внутреннего тестирования загорится иконка </p>					<p>Это означает, что внутренние системы аппарата готовы к подключению пациента.</p>				
26.	<p>Обработать руки кожным антисептиком на спиртовой основе, используя 6-ступенчатую методику и соблюдая время экспозиции, прежде чем отойдете от аппарата.</p>									

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Ж2/1	Редакция	001	Страница	7 из 8	
Название	ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК САМОТЕСТИРОВАНИЯ АППАРАТА B BRAUN DIALOG+ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГД/ГДФ/ГФ									

Составлено на основании:


1. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 127 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»,
2. «Аппарат для гемодиализа B|BRAUN Dialog+», руководство по эксплуатации 9.1x, IFU 38910318RU/ Rev.2.17.00/ July 2013.

Связанные документы:

№	тип	название
МЕД-Д2/1.2	Алгоритм	Гигиена рук
МЕД-Д2/1.3	Алгоритм	6-ступенчатая методика гигиенической обработки рук
МЕД-Ж2	Руководство	Установка в аппарат и заполнение физиологическим раствором экстракорпорального контура
МЕД-Ж2/2	Алгоритм	Установка и промывание кровопроводящего контура в аппарате B BRAUN DIALOG+ (процедура ГД, аппарат ГД, пакет с физ. раствором)
МЕД-Ж2/3	Алгоритм	Установка и промывание кровопроводящего контура в аппарате B BRAUN DIALOG+ (процедура ГД, аппарат ГДФ, онлайн)
МЕД-Ж2/4	Алгоритм	Установка и промывание кровопроводящего контура в аппарате B BRAUN DIALOG+ (процедура ГДФ/ГФ, аппарат ГДФ, онлайн)

Список изменений:

№ ред.	дата	№ приказа	перечень изменений
001	14.06.2017	32	Алгоритм МЕД-Ж2/1 «Включение и запуск самотестирования аппарата B BRAUN DIALOG+ для проведения процедуры ГД/ГДФ/ГФ» введен впервые.

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Ж2/1	Редакция	001	Страница 8 из 8	
Название	ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК САМОТЕСТИРОВАНИЯ АППАРАТА B BRAUN DIALOG+ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГД/ГДФ/ГФ								

Список ознакомления с документом

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				